

Cicatridina®

spray

Dr. Gorkič

FD
FARMA - DERMA

SESTAVA: aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametildisiloksan, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa, natrijeva sol hialuronske kisline, butan, izobutan, propan.

UPORABA: dodatna pomoč pri celjenju površinskih in globokih ran (odrgnine, raztrganine, opekline, kirurške rane, preležanine in razjede).

NAVODILO ZA UPORABO: Pred vsako uporabo poškodovani predel skrbno očistite in vsebnik za pršilo pretresite za boljše razpršitev prahu. Med pršenjem držite pršilo navpično 10 do 15 cm od poškodbe. Pršite izključno na poškodovani predel. Postopek ponovite 2 - do 3 - krat na dan.

PREVIDNOST OB UPORABI: Uporaba kateregakoli izdelka, posebno dolgotrajna, lahko pri površinski uporabi poveča preobčutljivost. V takem primeru uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom o nadaljnji terapiji.

KONTRAINDIKACIJE: Če ste preobčutljivi za sestavine.



F + **OPOZORILO:** Vsebnik za pršilo je pod pritiskom. Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Vsebnika ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 50°C. Ne prelučnjajte ali sežgite ga, niti ko je prazen. Ne pršite v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti izven dosega otrok. Izdelek ne vsebuje ozonu škodljivih snovi. Med uporabo ne kaditi. Izdelka ne smete zaužiti, Preprečiti stik z očmi, Preprečiti statično naelektrjenje.

ZELO LAHKO VNETLJIVO

Rok uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na embalaži.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Proizvajalec: **FARMA-DERMA s.r.l.**, Via del Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO), Italija (Italy)
Uvoznik: **DR. GORKIČ d.o.o.**, Oorniška ulica 11, 1370 Logatec, Slovenija

LOT :  **EXP** : 



SLO 23 REV 01



8