

Kaj pomeni, če je ena črta temnejša od druge?

Odtенок in intenzivnost črt nista pomembna. Če je rezultat testa pozitiven, se v okencu pojavi rožnata testna črta (T), katere barva ni nujno enaka barvi kontrolne črte (C). Koncentracija hCG v urinu se med nosečnostjo namreč postopoma zvišuje, zaradi česar se spreminja tudi intenziteta črte. Pri testiranju v zgodnji nosečnosti, ko je koncentracija hCG nizka, je lahko testna črta šibka, vendar njena prisotnost kaže na pozitiven rezultat.

Ali lahko uživanje določenih zdravil vpliva na končen rezultat?

Zdravila za zdravljenje neplodnosti, ki vsebujejo hCG ali hMG (humani menopavzni gonadotropin), lahko vplivajo na rezultat. Opravljanje testa neposredno po vbrizganju tovrstnih zdravil lahko vodi do lažnega pozitivnega rezultata. Ostala zdravila za neplodnost, analgetiki in kontracepcijske tablete ne vplivajo na rezultat. Če pa ste ravnokar prenehali z jemanjem kontracepcijskih tablet ali če ste pred kratkim jemali zdravila za neplodnost, lahko pride do nepravilnosti v menstrualnem ciklu in ste zato test za ugotavljanje nosečnosti opravili preuranjeno.

Kako zanesljiv je Baby CHECK PLUS?

Klinične raziskave in testiranja "in vitro" kažejo, da je stopnja zanesljivosti višja od 99 odstotkov.

Kako dolgo ostane rezultat v okencu viden?

Če je rezultat negativen, se lahko po več kot 10 minutah prikaže nerazločna testna črta (T). Ta nerazločna testna črta ne pomeni, da je rezultat pozitiven.

Pomnite: Ne upošteвайте rezultata, ki se pojavi več kot 10 minut po vzpostavitvi stika med testno konico in urinom!

Kaj naj storim, če je rezultat negativen?

Če je rezultat negativen, test ni zaznal nosečnega hormona hCG, torej niste noseči. Če en teden po izvedbi testa še vedno niste dobili menstruacije, test ponovite z novim testom Baby CHECK PLUS. Če je rezultat še vedno negativen in menstruacija še vedno izostaja, obiščite svojega zdravnika. Vzroke za izostanek menstruacije je morda potrebno poiskati drugje.

Kaj naj storim, če je rezultat pozitiven?

Če je rezultat pozitiven, obiščite svojega zdravnika. Zgodnja potrditev nosečnosti je izrednega pomena za zdravje nosečnice in njenega otroka.

Proizvajalec: VEDA.LAB,
ZAT DU LONDEAU, BP 181, 61006 ALENCON CEDEX (Francija)
Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o.
OBRJNIŠKA 11, 1370 LOGATEC (Slovenija)



VL-3084-04
Veda.lab ref. 3084
Zadnja sprememba: 1/2007

Baby CHECK PLUS®

Test za ugotavljanje nosečnosti za domačo uporabo

VSEBINA PAKIRANJA

Pakiranje vsebuje navodila za uporabo, 1 testno kaseto v hermetično zaprti aluminijasti foliji in vrečko s sušilnim sredstvom. Vrečka s sušilnim sredstvom ni namenjena uporabi.

PREDSTAVITEV


Test Baby CHECK PLUS omogoča hitro merjenje koncentracije hormona hCG, ki je osnova pri ugotavljanju nosečnosti.

NAČIN DELOVANJA

Baby CHECK PLUS deluje na osnovi kvalitativne analize, kjer se ugotavlja prisotnost humanega horionskega gonadotropnega hormona (hCG) v urinu.

Hormon hCG v koncentraciji 25 mIU/ml je možno zaznati v zgolj petih minutah.

Če hormon hCG v urinu ni prisoten, se testna črta (pri črki T) ne pojavi, pojavi pa se kontrolna črta (pri črki C).

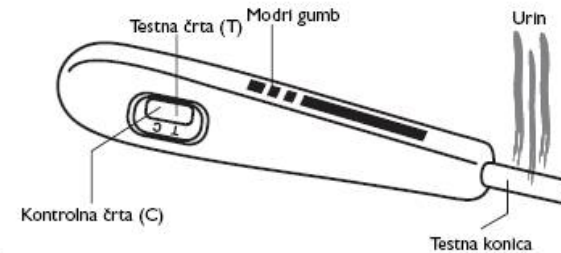

POSTOPEK

1. Test za ugotavljanje nosečnosti Baby CHECK PLUS vzemite iz zaščitne folije. Zavržite majhno vrečko s sušilnim sredstvom, ki jo poleg testa najdete v zaščitni foliji.
2. Modri gumb premaknite v smeri puščice (slika 1), tako da je testna konica v celoti vidna. Baby CHECK PLUS obrnite tako, da je stran z okencem usmerjena stran od vas, testna konica pa navzdol.



3. Testno konico namestite neposredno pod curek urina in jo na tem mestu držite najmanj 10 sekund (slika 2).



Urin lahko zberete tudi v čisto in suho posodico brez dodatkov. Vanj nato pomočite testno konico za vsaj 10 sekund, da se le-ta popolnoma namoči.

V primeru zgodnje nosečnosti uporabite prvi jutranji urin.

4. **Pomembno: Sedaj premaknite modri gumb nazaj v smeri puščice (slika 3), da se testna konica z vzorcem urina popolnoma skrije v tester.** Vzorec urina na ta način pride v stik s posebnimi reagenti, ki zaznajo prisotnost hormona.
5. Baby CHECK PLUS postavite na suho in trdno površino, pri čemer mora biti okence s testno in kontrolno črto obrnjeno navzgor. Preverite, ali je testna konica dejansko obstala v testerju Baby CHECK PLUS.
6. Počakajte 5 minut in preverite rezultat. Rezultata ne preverjajte po več kot 10 minutah. Pri testiranju v zgodnji nosečnosti vam svetujemo, da pred preverjanjem rezultata počakate 10 minut.



PREVERJANJE REZULTATA

Negativni rezultat pomeni, da niste noseči

Rezultat je negativen, ko se prikaže samo rožnata kontrolna črta (C) (slika 4). Testna črta se ne prikaže. Rezultat kaže, da niste noseči.



slika 4

Pozitiven rezultat pomeni, da ste noseči

Rezultat je pozitiven, ko se v okencu prikažeta dve rožnati črti – testna (T) in kontrolna (C) (slika 5). Takšen rezultat pomeni, da ste noseči. Obiščite svojega zdravnika in se z njim posvetujte o nadaljnjem spremljanju nosečnosti.

Tudi če je barva testne črte šibka, njena prisotnost v vsakem primeru kaže na pozitiven rezultat.



slika 5

Neveljaven rezultat

Rezultat testiranja je neveljaven, če se kontrolna črta (C) sploh ne prikaže (slika 6). Ker rezultata v tem primeru ni možno pojasniti, pomeni, da je rezultat testa neveljaven.

Najpogostejša vzroka za neveljaven rezultat sta naslednja:

- moder gumb ni bil nameščen do konca, kar prepreči stik testne konice z reagenti
- testna konica je preveč namočena v urinu.

Test ponovite z novim testom Baby CHECK PLUS in svežim vzorcem urina.



slika 6

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Ta test je namenjen izključno "in vitro" diagnostiki. Primeren samo za zunanjo uporabo. NE POGOLTNI.
2. Pred testiranjem obvezno natančno preberite priložena navodila za uporabo. Test ni zanesljiv, če ga ne izvedete v skladu z navodili proizvajalca.
3. Hranite pri temperaturi od 4 do 30° C. Ne zamrzujte!
4. Ne uporabljajte izdelka po pretečenem roku uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži in zaščitni foliji, ali če je folija poškodovana.
5. Test Baby CHECK PLUS je namenjen izključno enkratni uporabi.
6. Hranite izven dosega otrok.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kako deluje test za ugotavljanje nosečnosti Baby CHECK PLUS?

Ko je ženska noseča, začne njeno telo proizvajati hormon, ki se imenuje hCG (humani horionski gonadotropin). Koncentracija hormona v urinu s trajanjem nosečnosti narašča. Test za ugotavljanje nosečnosti Baby CHECK PLUS temelji na zaznavanju prisotnosti tega hormona.

Kdaj lahko uporabimo test?

Test za ugotavljanje nosečnosti Baby CHECK PLUS zazna nosečnostni hormon od prvega dne izostale menstruacije dalje.

Kdaj je najboljši čas za izvedbo testa?

Test lahko opravite ob katerikoli uri. V zgodnji nosečnosti priporočamo uporabo prvega jutranjega urina, ker je koncentracija nosečnostnega hormona takrat najvišja.

Ali zaužitje tekočin vpliva na rezultat?

Prekomerno uživanje tekočin lahko razredči urin, zaradi česar je lahko zaznavanje hormona hCG oteženo. Priporočamo vam, da pijete normalno.

Ali so lahko dobljeni rezultati lažni?

Rezultati so točni, dokler natančno sledite priloženim navodilom za uporabo. Rezultati so lahko lažni, če Baby CHECK PLUS pred testiranjem pride v stik z vlago. Baby CHECK PLUS je visoko občutljiv test, ki je uspešno prestopil strogo preverjanje kakovosti. Če so dobljeni rezultati nepričakovani ali si nasprotujejo, se posvetujte s svojim zdravnikom, saj lahko določene zdravstvene težave vplivajo na rezultat testa.

Testna konica je bila v stiku z urinom več kot 10 sekund. Ali bo dobljen rezultat kljub temu točen?

Da. Podaljšanje za nekaj sekund ne vpliva na rezultate.

Testna konica je bila v stiku z urinom manj kot 10 sekund. Ali bo dobljen rezultat kljub temu točen?

Ne, ker je količina vzorca lahko premajhna.

Kdaj je testiranje uspešno?

V okencu se pojavi rožnata kontrolna črta (C), kar pomeni, da je bil test uspešno izveden. Če se kontrolna črta ne pojavi, testiranje ponovite z novim testom Baby CHECK PLUS.

Kako naj preverim rezultat testa?

Če ste noseči, se v roku petih minut v okencu pojavita dve rožnati črti. Če je koncentracija hormonov zelo nizka, se rožnata testna črta (T) obarva zelo počasi. Zato vam priporočamo, da pred dejanskim preverjanjem rezultata počakate 10 minut, saj se le na ta način lahko prepričate, da hormon v urinu ne obstaja in da niste noseči.

NE UPOŠTEVAJTE REZULTATA, ki se pojavi več kot 10 minut po vzpostavitvi stika med testno konico in urinom.