

EAU THERMALE
Avène

SunsiMed

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

80 ml e

Navodilo za uporabo: 12/2016
Medicinski pripomoček oznaka CE: leto 2016.

CE




Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique

Laboratoires Dermatologiques Avène
45, place Abel-Gance
92654 Boulogne - Paris - France



PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES
29, avenue du Sidobre - 81106 Castres Cedex - France

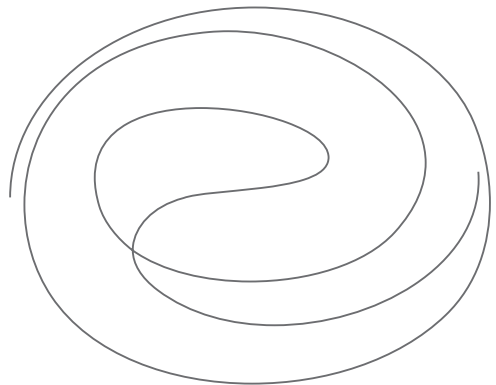

SunsiMed

MEDICINSKI PRIPOMOČEK
BREZ VONJA - SUH NA DOTIK

INDIKACIJE

Medicinski pripomoček, namenjen koži, ki je preobčutljiva na sonce. Ščiti pred nastankom raka kože (razen melanoma) in aktinične keratoze.

LASTNOSTI

SunsiMed predstavlja popolno rešitev za kožo, ki je preobčutljiva na sonce. Zahvaljujoč ekskluzivnemu kompleksu foto-zaščitnih sestavin iz raziskovalnega dela podjetja Pierre Fabre, SunsiMed ob vsakodnevni uporabi ščiti kožo pred škodljivimi posledicami izpostavljenosti sončnim žarkom.

- Fotostabilna sestava filtrov za optimalno zaščito pred UVB - UVA žarki.
- Močan antioksidant pretokoferil za okrepljeno zaščito celic.
- Avène termalna izvirska voda, ki je znana po svojem pomirjajočem in antiiritacijskem delovanju.



DOKAZANO DELUJE PROTI ŠKODLJIVIM VPLIVOM SONCA

- Ščiti pred nastankom kancerogenih (razen pri melanomu) in prekancerogenih

lezij pri aktiničnih keratozah.

- Ščiti pred poškodbami na DNA zaradi izpostavljenosti sončnim žarkom.
- Ščiti pred procesom fotostaranja.
- Ščiti pred oksidacijskim stresom zaradi izpostavljenosti UVA - UVB vidnim in infrardečim žarkom.

NAVODILO ZA UPORABO IN PRIPOROČENI ODMERKI*

Vsak dan zjutraj nanesite na kožo obraza in čez dan na dele telesa, ki so izpostavljeni soncu. V primeru daljšega izpostavljanja soncu, močnega znojenja ali stika z vodo nanesite ponovno. Izogibajte se neposrednemu izpostavljanju kože sončnim žarkom, kožo zaščitite z oblačili in drugimi predmeti (klobuk, sončna očala, majica itn.).

Slike v nadaljevanju teksta so namenjene kot vodilo pri oceni števila odmerkov (potiskov), potrebnih za posamezne dele telesa.


*Opomba: zmanjševanje števila potiskov lahko zmanjša raven zaščite.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI


Ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino tega izdelka. Če se pojavi alergijska reakcija, se posvetujte z zdravnikom. Izogibajte se stiku z očmi, da preprečite draženje (iritacijo). Če pride izdelek v stik z očmi, takoj sperite z vodo. Če razdraženost očesa ne izgine, poiščite pomoč zdravnika. Shranjujte izven doseg a otrok. Ni podatkov o uporabi izdelka med nosečnostjo in dojenjem, zato se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Po uporabi dobro zaprite. Ne nanašajte na sluznice. Ne uporabljajte na poškodovani koži. V primeru sočasnega zdravljenja, se posvetujte z zdravnikom. Uporaba drugih izdelkov na predelu, ki ga je potrebno zaščititi, ni priporočljiva, saj to zmanjša delovanje preventivne terapije. Če pri uporabi izdelka opazite katerikoli neželen učinek, se posvetujte z zdravnikom.




Obraz - 2 potiska

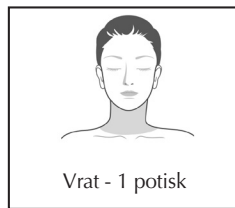

Vrat - 1 potisk

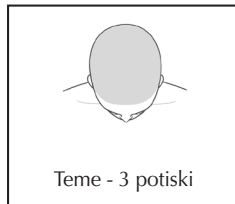

Teme - 3 potiski

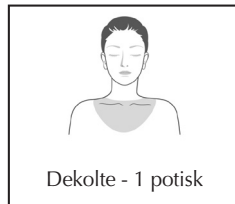

Dekolte - 1 potisk



Podlaket - 1 do 2 potiska
za vsako podlaket



Hrbtna stran dlani -
1 potisk za vsako roko



Preberite navodilo za
uporabo



Rok uporabnosti po
odprtju



Ne uporabljajte, če je
embalaža poškodovana



Številka serije



Datum izteka roka
uporabnosti



Proizvajalec

Ne nanašajte več kot 21 potiskov na dan.

SESTAVA: AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA). METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL [NANO]. BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE. DIETHYLHEXYL BUTAMIDE TRIAZONE. BUTYL METHOXYDIBENZOYL METHANE. BENZOIC ACID. CAPRYLYL GLYCOL. TOCOPHERYL GLUCOSIDE EXCIPIENTS.