

Vividrin® ectoin® kapljice za oko

Spoštovani uporabnik!

Pred začetkom uporabe **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** natančno preberite to navodilo. NAVODILO SHRANITE, saj vsebuje za vas pomembne podatke. Če imate o uporabi **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** še kakršnokoli dodatno vprašanje, se posvetujte s farmacevtom, zdravnikom ali pa se obrnite na nas.

1. Kaj so Vividrin® ectoin® kapljice za oko in za kaj jih uporabljamo

Vividrin® ectoin® kapljice za oko so medicinski pripomoček, ki vsebuje ectoin®, naravno molekulo, ki z zmanjševanjem vnetja in stabilizacijo membrane ščiti celice, ter hialuronsko kislino, človeku lastno naravno molekulo, ki z veliko sposobnostjo vezave vode in stabilizacijskimi lastnostmi očesu zagotavlja udobje.

Vividrin® ectoin® kapljice za oko so na voljo v obliki izotonične raztopine. Uporabljamo jih lahko za zdravljenje in preprečevanje simptomov sezonskega in celoletnega alergijskega vnetja očesnih veznic, ki ga povzročajo npr. cvetni prah, pršice, živalska dlaka ali plesen. Kapljice učinkovito zmanjšajo simptome, kot so srbenje, draženje, rdečina ali solzenje oči.

Vividrin® ectoin® kapljice za oko stabilizirajo naravni solzni film na dva načina: hialuronska kislina ima pozitivne učinke na vodno plast, ectoin® pa okrepi lipidno plast. Kapljice na ta način ščitijo oči pred škodljivimi vplivi alergenov in pomagajo pri obnovi razdraženega in občutljivega tkiva očesnih veznic.

Vividrin® ectoin® kapljice za oko ne vsebujejo konzervansov. Primerne so za uporabo tako pri osebah, ki nosijo kontaktne leče, kot osebah z občutljivimi očmi.

2. Opozorila in previdnostni ukrepi

- Vividrin® ectoin® kapljice za oko** ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi na ectoin®, hialuronsko kislino ali katerokoli drugo sestavino kapljic za oko.
- Po kirurškem posegu na očeh ali poškodbi očesa lahko **Vividrin® ectoin® kapljice za oko** uporabljate le po priporočilu zdravnika/zdravstvenega delavca.
- V primeru pojava alergijske reakcije morate **Vividrin® ectoin® kapljice za oko** nemudoma prenehati uporabljati.
- Iz higienskih razlogov mora vsak posamezen vsebnik s kapljicami za oko vedno uporabljati le ena in ista oseba.
- Kapljice lahko uporabljate največ 6 tednov po prvem odprtju vsebnika.

3. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Vividrin® ectoin® kapljice za oko

Medsebojno delovanje med **Vividrin® ectoin® kapljicami za oko** in drugimi kapljicami za oko ali mazili za lokalno uporabo v očesu ni znano. Po uporabi **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** počakajte vsaj 15 minut preden v oko naneseate drug medicinski pripomoček ali zdravilo.

4. Na kaj morate biti pozorni med nosečnostjo in dojenjem

Podatki o uporabi **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** med nosečnostjo in dojenjem trenutno niso na voljo.

Pred uporabo tega medicinskega pripomočka se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom:

- če ste noseči ali dojite,
- če obstaja možnost, da bi lahko bili noseči.

5. Kako uporabljati Vividrin® ectoin® kapljice za oko

Pri uporabi **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** natančno upoštevajte napotke v tem navodilu. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.



Če vam zdravnik ni predpisal drugače, v posamezno oko večkrat na dan naneseite 1-2 kapljici. Otrokom, starim 10 let ali mlajšim, morate pri uporabi **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** zagotoviti ustrezno pomoč.

Pred prvo uporabo ali če kapljic nekaj časa niste uporabljali, morate raztopino najprej načrpati. Pri črpanju raztopine vsebnik držite tako, da bo s konico kapalnega mehanizma usmerjen navzdol.


V nadaljevanju je prikazana pravilna uporaba **Vividrin® ectoin® kapljic za oko**.

Patentirani črpalni mehanizem **Vividrin® ectoin® kapljic za oko** omogoča, da raztopina kapljic ne vsebuje konzervansov, vendar pa se vsebnik zato lahko razlikuje od vsebnikov s kapljicami, ki ste jih morda že uporabljali.


Slike prikazujejo preprosto in enostavno uporabo **Vividrin® ectoin® kapljic za oko**.

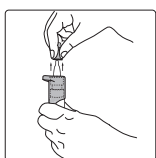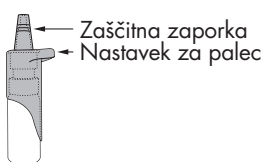

1. Pred vsako uporabo s konice vsebnika odstranite zaščitno zaporko. Pazite, da se konice vsebnika ne dotaknete s prsti.

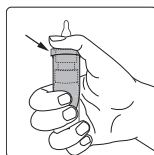

2. Palec namestite na ergonomsko oblikovan nastavek za palec, dva druga prsta pa na spodnji del vsebnika.

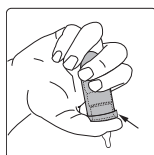

3. Vsebnik obrnite in ga držite kot je prikazano. Pred prvo uporabo morate črpalko najprej napolniti. To storite tako, da približno 7 krat pritisnete na nastavek za palec, dokler se ne pojavi prva kapljica.



4. Glavo nagnite rahlo nazaj, vsebnik pa namestite nad oko tako, kot vam to najbolj ustreza. S prstom proste roke spodnjo veko nežno potegnite navzdol, vsebnik držite navpično in nežno pritisnite na nastavek za palec, da nanese eno kapljico v oko. Oko nato zaprite in zrklo počasi obračajte, da se kapljica optimalno porazdeli po površini očesa. Po potrebi lahko za dodatno podporo in večjo natančnost uporabite tudi drugo roko.
5. Pazite, da konica vsebnika ne pride v stik z očmi ali prsti, da ne bi prišlo do kakršnekoli kontaminacije raztopine.
6. Takoj po uporabi na konico vsebnika namestite zaščitno zaporko.
7. Postopek ponovite še na drugem očesu.

6. Možni neželeni učinki Vividrin® ectoin® kapljic za oko

Vividrin® ectoin® kapljice za oko uporabniki dobro prenašajo. Neželeni učinki do danes niso znani.

V posameznih primerih lahko **Vividrin® ectoin® kapljice za oko** povzročijo kratkotrajno draženje očesa, povečajo količino krvi v žilah očesa (hiperemija) ali povzročijo vnetje očesne veznice (konjunktivitis).

Ce opazite neželene učinke, ki bi lahko bili povezani z uporabo **Vividrin® ectoin® kapljic za oko**, o tem obvestite zdravnika ali farmacevta. Če se stanje ne izboljša ali se poslabša, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

7. Shranjevanje Vividrin® ectoin® kapljic za oko

Vividrin® ectoin® kapljic za oko ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in ampuli.

Vividrin® ectoin® kapljice za oko shranjujte pri temperaturi od 2 °C do 25 °C.

Kje lahko dobite Vividrin® ectoin® kapljice za oko?

Kakšna pakiranja so na voljo?

Vividrin® ectoin® kapljice za oko lahko dobite brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Na voljo so v pakiranjih z 10 ml raztopine in pakiranjih z 10 posameznimi odmerki po 0,5 ml raztopine.

Sestavine

Ectoin®, hialuronska kislina, natrijev klorid in voda.

8. Izdelovalec

bitop AG, Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Nemčija



Distributer za Slovenijo:

PharmaSwiss d.o.o.,
Brodišče 32, 1236 Trzin, Slovenija
Telefonska številka
za pomoč uporabnikom: +3861 236 47 00

9. Besedilo je bilo nazadnje revidirano: julij 2015, Rev.01


Razlaga simbolov, uporabljenih na ovojnini izdelka



Oznaka CE s številko priglašene organa



Številka serije

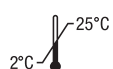

Omejitev temperature



Čas uporabnosti po prvem odprtju vsebnika



Izdelovalec



Uporabno do (Datum izteka roka uporabnosti)



Preberite navodilo za uporabo



Sterilen izdelek, pripravljen z aseptično filtracijo



Opozorilo, glejte navodilo za uporabo (za pomembna opozorila/previdnostne ukrepe)