

Masculan® kondomi – navodila za uporabo

Masculan izdelki so zanesljiva zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi in nezaželeo nosečnostjo. Pred uporabo preverite rok uporabnosti na ovitku kondoma.



Kondom previdno vzemite iz ovitka in pazite da ga ne poškodujete z nohti, nakitom ali podobnim. Kondom s palcem in kazalcem stisnite skupaj in kontrolirajte da se rob za odvijanje nahaja na zunanji strani, tako da se kondom varno odvija.



Kondom namestite na nabrekli penis in preden pride do stika penisa s telesom partnerja. Kondom namestite na vrh penisa in v vrhnjem delu kondoma pustite dovolj prostora za spermo. Konico s prsti stisnite tako, da v njej ni zraka. Potem kondom z drugo roko odvijte po celotni dolžini nabrekliga penisa, pri tem pazite da se kondom ne naguba.



Medtem ko je penis še v erekciji, izvlecite penis iz nožnice, pri čemer trdno držite kondom na koncu penisa, da ne zdrsne. Pri nevaginalni (analni) uporabi obstaja visoko tveganje, da kondom zdrsne ali se poškoduje.



Uporabljene kondome higiensko odstranite in vrzite v smetnjak. Vsak kondom uporabite samo enkrat. Pri ponovni uporabi obstaja povečana nevarnost, da se kondom strga, zdrsne in vodi do povzročitve spolno prenosljivih bolezni ali do nezaželene nosečnosti.

Osebe z alergijo na lateks kondomov iz lateksa, proizvedenega iz naravnega kavčuka, ne smejo uporabljati. Shranjujte na hladnem in suhem in ne izpostavljajte sončni svetlobi. Kot dodatni lubrikant priporočamo samo lubrikante na vodni osnovi. Pri hkratni zunanji uporabi zdravil na penisu ali vagini, se pred uporabo kondoma posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Prosimo upoštevajte: Nobeno sredstvo ne nudi 100% zaščite pred nezaželeno nosečnostjo ali okužbo – kljub temu vedno uporabljajte kondome Masculan.