

PARNI INHALATOR Z BLAZINICAMI VAPOPAD

NAVODILA ZA UPORABO




Čestitamo vam za nakup parnega inhalatorja. Vaš novi inhalator vam nudi vse prednosti terapije s paro doma, v pisarni ali na poti.

- Pomirjujoča para z vonjem mentola ali rožmarina in sivke
- Prenosen – uporabite ga lahko kjer koli
- Preprosto napolnite z vročo vodovodno vodo, dodajte blazinico dišave in vdihujte
- Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju – za ponovno uporabo
- 2 blazinici VapoPad priloženi

SESTAVNI DELI

1. Vrhnji del
2. Srednji del
3. Spodnji del

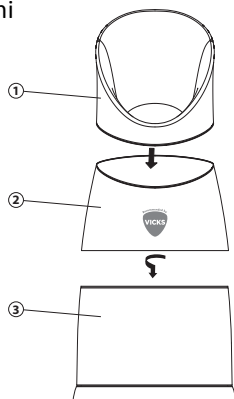

NAVODILA ZA UPORABO


Inhalator pred prvo uporabo temeljito sperite.

1. Odstranite vrhnji del inhalatorja s spodnjega, tako da ju zavrtite v nasprotni smeri.
2. Spodnji del inhalatorja napolnite z vročo (ne vrelo) vodovodno vodo do oznake.



OPOMBA: Če nalijete preveč vode, bo iztekala iz inhalatorja.

3. Odprite zavitek blazinice VapoPad in jo vstavite v vodo. Pokrijte z vrhnjim delom.

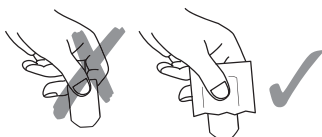

POZOR: Izdelek vsebuje vročo vodo. Da preprečite polivanje vroče vode, se prepričajte, da ste pravilno namestili vrhnji del ohišja, tako da se je zaskočil na svoje mesto.

4. Vdihnite pomirjujočo soparo.



VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Inhalator po vsaki uporabi temeljito pomijte in osušite. Lahko ga vložite tudi v zgornjo košaro pomivalnega stroja.



UPORABA Z BLAZINICAMI VAPOPAD

Inhalator je bil zasnovan za delovanje z blazinicami VapoPad z vonjem mentola ali rožmarina in sivke.



Uporabljajte samo z blazinicami VapoPad rožmarin in sivka (VBR7) ali mentol (VH7)



OPOZORILO:

Blazinica lahko predstavlja nevarnost zadužitve. Hranite zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. **P102** Hraniti zunaj dosega otrok. **P302 + P352** PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. **P333 + P313** Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine: evkaliptusovo olje, mentol, glikol, olje listov cedre in drugo.



Ne uporabljajte za otroke, mlajše od 36 mesecev, in ne več kot 16 ur v 24 urah in/ali ne več kot 2 blazinici v 24 urah.

GARANCIJA

Za inhalator velja 2-letna garancija, ki pokriva tovarniške napake. Garancijska doba začne teči z datumom nakupa.

INHALATOR S JASTUČIĆIMA VAPOPAD

UPUTE ZA UPORABU




Čestitamo Vam na kupnji inhalatora. Vaš novi inhalator omogućuje sve blagodati terapije parom kod kuće, u uredu ili tijekom putovanja.

- Umirujuće pare mentola ili ružmarina i lavande
- Prenosiv – rabite ga bilo gdje
- Jednostavno ga napunite vrućom vodom iz slavine, dodajte mirisni jastučić i dišite
- Siguran za pranje u perilici za posuđe - mogućnost ponovne uporabe
- Uključena 2 mirisna jastučića VapoPad

DIJELOVI

1. Gornji dio
2. Središnji dio
3. Postolje

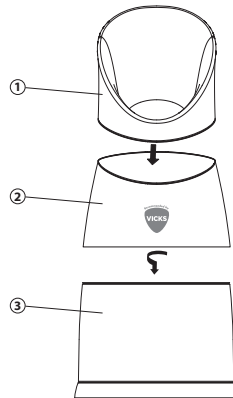

UPUTE ZA UPORABU


Dobro isperite uređaj prije prve uporabe.

1. Odvojite gornji dio uređaja od postolja tako da ih zavrnete u suprotnim smjerovima i potom podignete gornji dio.
2. Napunite postolje vrućom (ne kipućom) vodom iz slavine do označene razine.



NAPOMENA: Uređaj će curiti ako ga prepunite vodom.

3. Otvorite paketić VapoPad i dodajte ga u vodu. Vratite gornji dio.

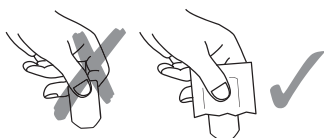

OPREZ: Proizvod sadrži vruću vodu. Kako biste izbjegli prolijevanje vruće vode nakon punjenja, provjerite je li gornji dio kućišta pravilno pričvršćen na svoje mjesto.

4. Udišite umirujuće pare.



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Nakon svake uporabe dobro operite i osušite inhalator. Uređaj se može prati na gornjoj polici perilice za posuđe.



UREĐAJ RABITE UZ JASTUČIĆE VAPOPAD

Inhalator je namijenjen uporabi s mirisnim jastučićima VapoPad s mirisom mentola ili ružmarina i lavande.



Uređaj rabite isključivo s mirisnim jastučićima VapoPad ružmarin i lavanda (VBR7) ili mentol (VH7)



UPOZORENJE:

Jastučići mogu predstavljati opasnost od gušenja. Držite ih izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju na koži. **P102** Čuvati izvan dohvata djece. **P302 + P352** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. **P333 + P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Sastojci: ulje eukaliptusa, mentol, glikol, ulje lišća cedra i drugo.



Nije namijenjeno djeci mlađoj od 36 mjeseci ni za primjenu dulju od 16 sati u razdoblju od 24 sata i/ili uporabu više od 2 jastučića u razdoblju od 24 sata.

JAMSTVO

Proizvod ima jamstvo na tvorničke nedostatke u trajanju od 2 godine od datuma kupnje.