

ČETKICA PROTIV GLJIVICA NA NOKTIMA

HR ČETKICA PROTIV GLJIVICA NA NOKTIMA

Klinički dokazan tretman za infekcije gljivicama na noktima.

Za što je namijenjena: FungeX četkica protiv gljivica na noktima je medicinski proizvod za tretiranje i prevenciju gljivične infekcije noktiju (onihomikoze).

Primjena: FungeX četkica protiv gljivica na noktima je:

- Klinički dokazano učinkovita protiv gljivica na noktima
- Pomaže u sprječavanju širenja i smanjuje rizik od ponovne infekcije
- Poboljšava izgled noktiju (krhkih, nabranih, zadebljanih, grubih ili bez boje)
- Omekšava i hrani nokte
- Podržava čvršće nokte zdravijeg izgleda
- Brzo se suši, nevidljiv završni sloj – diskretna svakodnevna uporaba

O gljivičnim infekcijama noktiju: Gljivična infekcija noktiju (onihomikoza):

- Jedan je od najčešćih poremećaja noktiju
- Često započinje kao bijela ili žuta mrlja ispod nokta
- Može uzrokovati zadebljanje, lomljivost, brazde ili promjenu boje nokta
- Može se proširiti na druge nokte i prenijeti na druge osobe u zajedničkim prostorima (npr. bazeni, teretane)

Kako FungeX djeluje: FungeX djeluje protiv gljivica i istovremeno njeguje nokte:

- Zaštitni sloj:** Stvara okruženje nepovoljno za rast gljivica
- Barijera:** sprječava širenje i ponovnu infekciju
- pH:** smanjuje kiselost noktiju, usporava razvoj gljivica.
- Sadrži biotin** za podršku glatkijim i zdravijim noktima.

Upute za uporabu: Samo za vanjsku primjenu. Primjenu na djeci mora provesti odrasla osoba.

- Očistite i osušite zahvaćene nokte. Nema potrebe za turpijanjem noktiju.
- Nanesite jednom dnevno pomoću precizne četkice. Ako je moguće, nanesite na cijelu gornju površinu nokta, kao i na donju stranu.
- Nakon svake uporabe čvrsto zatvorite bočicu. Ostavite da se osuši 1 – 2 minute.

Nastavite sa svakodnevnom primjenom dok zaraženi nokat potpuno ne izraste. Može se preventivno nanositi na zdrave nokte. Četkica ostaje čista i sprječava širenje gljivica na druge nokte. Može se upotrebljavati uz oralne antifungalne lijekove ako su propisani.

Savjet: Dosljednost je ključna. Prerani prestanak primjene povećava rizik od ponavljene infekcije.

Ako simptomi potraju ili se pogoršaju, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Korisni savjeti za prevenciju:

- Održavajte stopala suhima, naročito između prstiju
- Nosite pamučne ili vunene čarape i mijenjajte ih svakodnevno
- Izbjegavajte dijeljenje grickalica za nokte, obuću ili ručnika
- Nemojte hodati bosu u zajedničkim prostorima

Primjena tijekom trudnoće i dojenja: Nema dostupnih sigurnosnih podataka. Ako ste trudni ili dojite, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uporabe.

Kontraindikacije: Ne upotrebljavajte ako ste alergični na bilo koji od navedenih sastojaka. Nemojte nanositi na otvorenu ili oštećenu kožu zbog rizika od iritacije ili infekcije. Posavjetujte se s liječnikom prije uporabe ako imate dijabetes, lošu cirkulaciju ili oslabljeni imunološki sustav.

Moguće nuspojave: Rijetke: crvenilo, iritacija, svrbež, oticanje, bol,

odvajanje nokta ili alergijske reakcije (npr. osip). Ako dođe do alergijske reakcije, odmah prekinite uporabu i potražite savjet liječnika.

⚠ UPOZORENJA I MJERE OPREZA Samo za vanjsku primjenu. Izbjegavajte kontakt s očima i sluznicama. Ne nanosite na otvorene rane ili oštećenu kožu. Nemojte čvrsto poviti ni zagrijavati tretirano područje. Nemojte izlagati tretirane nokte jakom sunčevom svjetlu odmah nakon nanošenja.

Čuvanje: Čuvati na suhom mjestu na sobnoj temperaturi (5 – 25 °C). Izbjegavati udisanje para. Čuvati izvan dohvata djece. Ne upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Sadržaj: 1 FungeX četkica protiv gljivica na noktima s 5 ml otopine. Jedna bočica od 5 ml osigurava približno 250 primjena. Dovoljno za nekoliko mjeseci svakodnevne uporabe na jednom zahvaćenom noktu

Sastojci: Etil laktat, glicerol, voda, laktatna kiselina, biotin.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA Znakovi upozorenja i simboli na pakiranju i u uputi za uporabu ključni su za sigurno i pravilno korištenje ovog proizvoda te za zaštitu Vas i drugih od ozljeda. Simboli su objašnjeni u donjoj tablici:

Simbol	Objašnjenje
	Simbol proizvođača
	Simbol koji označava da je potrebno da korisnik pročita uputu za uporabu
	Simbol koji označava da je potreban oprez prilikom rukovanja proizvodom
	Simbol za rok uporabe
	Simbol koji označava da je predmet medicinski proizvod
	Simbol koji označava jedinstvenu identifikaciju proizvoda („UDI“)
	Simbol za broj serije
	Nije za djecu u dobi od 4 godine i mlađu
	Čuvati izvan dohvata djece
	Nije za trudnice i dojilje
	Proizvod treba čuvati na temperaturi između 5 - 25 °C

Svaki ozbiljan štetni događaj koji se dogodi u vezi s ovim proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik ima prebivalište.

Zbrinite ambalažu i iskorištene dijelove u skladu s nacionalnim propisima.

Za više informacija o FungeXu posjetite www.fungex.com. Za sve upite o proizvodu obratite se distributeru.

Proizvođač:
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
The Netherlands
www.theotclab.com

Distributer:
Pontus Pharma d.o.o.,
Kralja Zvonimira 62,
10000 Zagreb,
Hrvatska

CE 0482
template
25J1_25J1_202510

SI ČOPIČ PROTI GLIVICAM NA NOHTIH FUNGEX

Klinično dokazano odstranjevanje glivičnih okužb nohtov.

Za kaj je namenjen: Čopič proti glivicam na nohtih FungeX je medicinski pripomoček za odstranjevanje in preprečevanje glivičnih okužb nohtov (onihomikoza).

Nanos: Čopič proti glivicam na nohtih FungeX:

- Klinično dokazano učinkovit proti glivicam na nohtih.
- Pomaga preprečevati širjenje in zmanjšuje tveganje za ponovno okužbo.
- Izboljša videz nohtov (lomljivi ali krhki, z brazdami prepredeni, zadebeljeni, hrapavi ali razbarvani).
- Mehča in neguje nohte.
- Prispeva k trdnjšim nohtom zdravega videza.
- Hitro sušiča se, nevidna površina - diskretna vsakodnevna uporaba.

O glivičnih okužbah nohtov: Glivična okužba nohtov (onihomikoza):

- Je ena najpogostejših bolezní nohtov.
- Pogosto se začne kot bela ali rumena lisa pod nohtom.
- Lahko povzroči zadebelitev, krhkost ali lomljivost, prepredenost z brazdami ali razbarvanje.
- Lahko se razširi na druge nohte in se prenese na druge osebe v skupnih prostorih (npr. plavalni bazeni, telovadnice).

Kako deluje FungeX: FungeX združuje protiglivično delovanje in nego nohtov:

- **Zaščitni sloj:** ustvarja okolje, ki je neugodno za rast glivic.
- **Pregradna funkcija:** preprečuje širjenje in ponovno okužbo.
- **Učinek pH:** zmanjša kislost nohtov in upočasni razvoj glivic.
- **S biotinom** za bolj gladke in zdrave nohte.

Navodila za uporabo: Samo za zunanjo uporabo. Pri otrocih lahko nanese samo odrasla oseba.

1. Očistite in posušite prizadeti noht/ nohte.
2. Enkrat dnevno nanesite s priloženim natančnim čopičem. Prekrijte celotno površino nohta in po možnosti tudi spodnjo stran nohta. Po vsaki uporabi stekleničko tesno zaprite.
3. Počakajte 1-2 minuti, da se posuši.

Nadaljujte z vsakodnevno uporabo, dokler zdravi noht popolnoma ne preraste okuženega nohta. Lahko se uporablja tudi preventivno na zdravih nohtih. Čopič ostane čist in preprečuje širjenje glivic med nohti. Lahko se uporablja skupaj s peroralnimi antimikotiki, če so predpisani.

Nasvet: doslednost je ključnega pomena. Predčasna prekinitev uporabe poveča tveganje za ponovitve okužbe.

Če simptomi vztrajajo ali se poslabšajo, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Koristni nasveti za preprečevanje:

- Poskrbite za suha stopala, zlasti med prsti na nogah.
- Nosite bombažne ali volnene nogavice in jih vsak dan zamenjajte.
- Ne izmenjujte si pripomočkov za nego nohtov, obutve ali brisač.
- Ne hodite bosi po skupnih prostorih.

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem: Podatki o varnosti niso na voljo. Če ste noseči ali dojite, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Kontraindikacije: Ne uporabljajte, če ste alergični na katero koli navedeno sestavino. Ne nanašajte na odprto ali poškodovano kožo zaradi nevarnosti draženja ali okužbe. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če imate sladkorno bolezen, slabo prekrvavitve ali oslabilen imunski sistem.

Možni neželeni učinki: Redki: rdečica, draženje, srbenje, oteklina, bolečina, luščenje nohtov ali alergijske reakcije (npr. izpuščaj). Če se pojavi alergijska reakcija, takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč.

⚠ OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI Samo za zunanjo uporabo. Izogibajte se stiku z očmi in sluznicami. Ne nanašajte na odprte rane ali poškodovano kožo. Obdelanega območja ne povijte tesno in ne segrevajte. Neposredno po nanosu obdelanih nohtov ne izpostavljajte močni sončni svetlobi.

Shranjevanje: Shranjujte v suhem prostoru pri sobni temperaturi (5-25 °C). Izogibajte se vdihavanju hlapov. Shranjujte nedosegljivo otrokom! Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži.

Vsebuje: 1 čopič proti glivicam na nohtih FungeX s 5 ml raztopine. Ena 5 ml steklenička omogoča približno 250 nanosov. Zadostuje za več mesecev vsakodneвне uporabe na enem prizadetem nohtu.

Sestavine: Etil laktat, glicerín, voda, mlečna kislina, biotin.

RAZLAGA SIMBOLOV Opozorilni znaki in simboli na ovojnini in v navodilih za uporabo so ključnega pomena za varno in pravilno uporabo tega izdelka ter za zaščito vas in drugih pred morebitnimi poškodbami. Pojasnila simbolov so prikazana v spodnji tabeli:

Simbol	Razlaga
	Simbol za proizvajalca
	Simbol, ki označuje, da je treba prebrati navodila za uporabo
	Simbol, ki označuje, da je pri uporabi pripomočka potrebna previdnost
	Simbol za rok uporabnosti
	Simbol, ki označuje, da je izdelek medicinski pripomoček
	Simbol, ki označuje edinstveni identifikator medicinskega pripomočka
	Simbol za številko serije (LOT)
	Ni primerno za otroke, stare 4 leta ali manj
	Shranjujte nedosegljivo otrokom
	Ni primerno za nosečnice ali doječe matere
	Izdelek je treba shranjevati pri temperaturi med 5 °C in 25 °C

Vsak resen zaplet, ki se zgodi v zvezi s tem izdelkom, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik prebivališče.

Embalažo in uporabljene dele odstranite v skladu s predpisi posamezne države.

Za več informacij o izdelku FungeX obiščite spletno stran www.fungex.com. Za vsa vprašanja o izdelku se obrnite na distributerja.

Proizvajalec
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Nizozemska
www.theotclab.com

Distributer:
Pontus Pharma d.o.o.
Kralja Zvonimira 62,
10000 Zagreb,
Hrvaška

CE 0482
template
25J1_25J1_202510