

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnike. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najbolj koristil, ga uporabljajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

VITAgyn C[®]

vaginalna krema s kislim pH

SESTAVA

Voda, cetil-stearilni alkohol, glicerol, olje sladkega mandlja, cetil-stearilni alkohol etoksilat, karitejevo maslo, srebrov citrat in citronsko kislina, natrijev askorbilfosfat, vitamin E acetat, imidazolidinil urea, silikonsko olje, mlečna kislina, natrijev poliakrilat, maltodekstrini, natrijev hidrosulfid, dinatrijeva sol EDTA.

V KAKŠNI OBLIKI JE

V pakiranju vaginalne kreme VITAgyn C[®] s kislim pH je ena tuba s 30 g e in 6 aplikatorjev za enkratno uporabo.

KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

Obnova kislega nožničnega pH med 3,8 in 4,4 zavira rast mikroorganizmov, ki povzročajo bakterijsko vaginozo in ustvari neugodno okolje za kolonizacijo bakterije *E. coli* ter posledično ponavljajoče se okužbe sečil. Kisli vaginalni pH tudi onemogoča virulentne dejavnike *Trichomonas vaginalis* in širjenje *Candide* v nožnični sluznici.

INDIKACIJE

Dodatna pomoč pri terapiji in preprečevanju bakterijske vaginoze in ponavljajočih se okužb sečil. Uporaba je priporočljiva predvsem pri uporabnicah s ponavljajočimi stanji in po farmakoloških zdravljenjih z antibiotiki. Vaginalna krema VITAgyn C[®] s kislim pH obnavlja in ohranja fiziološki pH nožnice in pomaga pri razvoju naravne laktobakterijske flore. Na ta način preprečuje nastanek stanj, ki omogočajo razvoj bakterijske vaginoze, tudi v nosečnosti.

KDAJ NAJ GA NE BI UPORABLJALI

Ne uporabljajte v primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka.

Nosečnost in dojenje

Vaginalna krema VITAgyn C[®] s kislim pH se lahko uporablja že v prvih mesecih nosečnosti in med dojenjem.

Vpliv na upravljanje vozil in strojev

Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI


Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite vaginalno kremo VITAgyn C® s kislim pH v kombinaciji z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili za vaginalno uporabo.

KAKO SE UPORABLJA


VITAgyn C® vaginalna krema s kislim pH je brez vonja, ne pušča oljnih madežev in ne umaže spodnjega perila. Pred in po uporabi pripomočka si umijte roke.

- 1) *Zavarovan predel tube odprite z nasprotno stranjo pokrovčka. Privijte aplikator za enkratno uporabo na vrat tube.*
- 2) *Od spodaj nežno stiskajte tubo, da se aplikator v celoti napolni z zadostno količino kreme.*
- 3) *Aplikator odvijte s tube in ga vstavite v nožnico. S pritiskom na bat aplikator popolnoma izpraznite. Za lažje uvajanje in pravilno izpraznenje aplikatorja je priporočljivo, da pri tem ležite. Po uporabi istega aplikatorja ne uporabite ponovno, ampak ga zavržite.*


Priporočljiva je osebna uporaba medicinskega pripomočka.

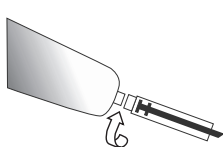

1

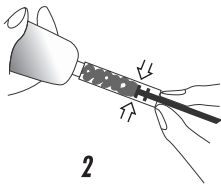

2

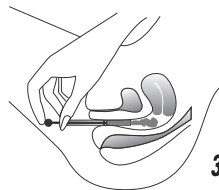

3

KDAJ IN KAKO DOLGO

Vaginalno kremo VITAgyn C® s kislim pH nanesite enkrat dnevno, najbolje zvečer pred spanjem, 6 zaporednih dni. Za vzdrževanje nanesite 1-2 nanosa tedensko, 12 tednov ali več.

NEŽELENI UČINKI

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezni terapiji. Če se pojavijo neželeni učinki, ki niso opisani v teh navodilih, obvestite o tem svojega zdravnika ali farmacevta.

OPOZORILA

Shranjujte nedosegljivo in nevidno otrokom. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

ROK UPORABE, SHRANJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE

Rok uporabe je naveden na embalaži in na tubi; nanaša se na zaprt in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte tesno zaprt, zaščiten pred svetlobo in toploto. Medicinskih pripomočkov naj ne bi odvrgli v odpadne vode ali med gospodinske odpadke. O načinu odstranjevanja medicinskih pripomočkov, ki jih ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK  0373



Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l.
Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO) ITALIJA (ITALY)

Uvoznik:

DR. GORKIČ d.o.o.

Obrotniška ulica 11, 1370 LOGATEC, SLOVENIJA