

# w wellion®

## WAVE *professional*



**NAVODILA  
ZA UPORABO**



## UVOD

Merilnik tlaka Wellion WAVE professional uporablja oscilometrično metodo merjenja krvnega tlaka.

Elektronski merilnik krvnega tlaka za samodejno merjenje je namenjen zdravstvenim strokovnjakom ali uporabi v domačem okolju za spremljanje in prikazovanje diastoličnega in sistoličnega krvnega tlaka ter srčnega utripa s pomočjo ročne manšete, ki jo namestimo na levi nadlakti v skladu z navodili v razdelku »NAMESTITEV NADLAKTNE MANŠETE«.

Izdelek je skladen z zahtevami glede elektromagnetne združljivosti EN 60601-1-2 in varnostnih standardov EN 60601-1 ter učinkovitosti IEC 80601-2-30, kot je določeno v direktivi EGS 93/42 / EGS.

# KAZALO

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>O KRVNEM TLAKU</b>                     | <b>6</b>      |
| Kaj je krvni tlak?                        | 6             |
| Kaj je hipertenzija in kako jo nadziramo? | 6             |
| Zakaj doma meriti krvni tlak?             | 7             |
| Razvrstitev krvnega tlaka po merilih SZO  | 8             |
| Spreminjanje krvnega tlaka                | 9             |
| <br><b>OPOMBE O VARNOSTI</b>              | <br><b>11</b> |
| Pojasnilo simbolov                        | 11            |
| <br><b>VARNOSTNI UKREPI PRED UPORABO</b>  | <br><b>15</b> |
| <br><b>OPIS DELOV</b>                     | <br><b>17</b> |
| Simboli na zaslonu                        | 18            |
| Dodatna oprema                            | 19            |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VSTAVLJANJE ALI MENJAVA BATERIJ</b>                 | <b>20</b> |
| <b>NASTAVITEV ČASA</b>                                 | <b>23</b> |
| <b>NASTAVITEV ENOTE mmHg/kPa</b>                       | <b>24</b> |
| <b>PRIKAZ RAZVRSTITVE KRVNEGA TLAKA PO MERILIH SZO</b> | <b>25</b> |
| <b>NAMESTITEV MANŠETE</b>                              | <b>26</b> |
| Kako pravilno izvesti meritev krvnega tlaka            | 27        |
| <b>KAKO MERITI KRVNI TLAK</b>                          | <b>28</b> |
| Pregledovanje pomnilnika                               | 29        |
| Brisanje pomnilnika                                    | 30        |
| <b>NEGA IN VZDRŽEVANJE</b>                             | <b>31</b> |
| <b>ODPRAVLJANJE TEŽAV</b>                              | <b>34</b> |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>SPECIFIKACIJA IZDELKA:</b>                 | <b>37</b> |
| <b>IZJAVA</b>                                 | <b>38</b> |
| <b>LASTNOSTI IZDELKA</b>                      | <b>39</b> |
| <b>PROIZVAJALČEVE ZAHTEVE</b>                 | <b>40</b> |
| <b>IZJAVA O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI</b> | <b>42</b> |
| <b>GARANCIJA PROIZVAJALCA</b>                 | <b>43</b> |

## O KRVNEM TLAKU

### 1. Kaj je krvni tlak?

Krvni tlak je sila, s katero kri pritiska na stene arterij. Sistolični tlak se pojavi, ko se srce skrči. Diastolični tlak se pojavi, ko se srce razširi.

Krvni tlak merimo v milimetrih živega srebra (mmHg). Naravni krvni tlak pomeni osnovni krvni tlak, ki ga izmerimo zjutraj, ko je oseba še v mirovanju in ni še ničesar zaužila.

### 2. Kaj je hipertenzija in kako jo nadziramo?

Hipertenzija je nenormalno visok arterijski krvni tlak. Če je ta brez nadzora, lahko povzroči številne zdravstvene težave, med njimi tudi možgansko kap in srčni infarkt.

Visok krvni tlak lahko nadziramo s spremenjenim načinom življenja, izogibanjem stresu in zdravili, ki jih predpiše zdravnik.

Da bi preprečili visok krvni tlak ali ga obdržali pod nadzorom:


- ne kadite
- vzdržujte primerno telesno težo
- redno telovadite
- zmanjšajte vnos soli in maščob
- poskrbite za redne telesne preglede

### 3. Zakaj doma meriti krvni tlak?

Merjenje krvnega tlaka v bolnišnici ali zdravstveni ordinaciji lahko povzroči zaskrbljenost, ki za 25 do 30 mmHg zviša vrednosti, izmerjene v domačem okolju. Merjenje na domu zmanjšuje učinke zunanjih vplivov na krvni tlak, dopolnjuje zdravnikove meritve in zagotavlja natančnejšo celotno zgodovino krvnega tlaka.

## 1. Razvrstitev krvnega tlaka po merilih SZO

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je določila standarde za oceno visokega krvnega tlaka ne glede na starost. Ti so prikazani v spodnji tabeli.

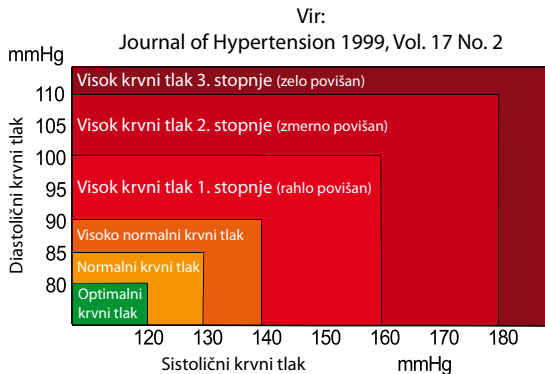




## 2. Spreminjanje krvnega tlaka

Krvni tlak posameznika se spreminja dnevno in glede na letni čas. Zaradi različnih pogojev čez dan se lahko spremeni za 30 do 50 mmHg. Pri posameznikih z visokim krvnim tlakom so te spremembe lahko še izrazitejše.

Običajno se krvni tlak poviša med delom ali igro ter se med spanjem zniža na najnižjo raven. Zato ne bodite pretirano zaskrbljeni zaradi rezultatov posamezne meritve.

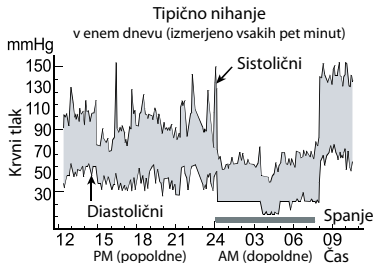

Krvni tlak merite vsak dan ob istem času v skladu s postopkom, opisanem v tem priročniku in spoznajte svoj normalni krvni tlak. Če boste imeli na voljo več izmerjenih vrednosti, boste dobili tudi natančnejši profil krvnega tlaka.

Pri zapisovanju vrednosti ne pozabite zabeležiti datuma in časa. O podatkih svojega krvnega tlaka se posvetujte z zdravnikom, ki vam jih bo pojasnil.

## OPOMBE O VARNOSTI

Opozorilni znaki in simboli, ki so prikazani tukaj, so navedeni zaradi vaše varnosti, pravilne uporabe enote in preprečevanja poškodb ter škode na napravi.

Simboli in njihov pomen so naslednji:

### Pojasnilo simbolov



Simbol pomeni prepovedi (česar ne bi smeli narediti). Stvari, ki vključujejo dejanske prepovedi, so označene z besedilom ali povezanimi slikami. Levi simbol pomeni »splošno prepoved«.



Znak pomeni nekaj, kar je obvezno (kar moramo vedno upoštevati). Stvari, ki vključujejo obvezna dejanja, so označene z besedilom ali povezanimi slikami. Levi simbol se nanaša na »splošno obveznost«.



Simbol pomeni nekaj, česar ne moremo razstaviti oziroma »Ne razstavljajte«.



Oprema tipa BF



Pred uporabo pozorno preberite



Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11 (2) Direktive 2002/96 / EC (WEEE).

Bolnik mora upoštevati zdravnikova navodila in ne sme sam presojati merilnih rezultatov ter se samozdraviti. Samodiagnosticiranje merilnih rezultatov in samozdravljenje je nevarno. Naprave ne smemo uporabljati za diagnosticiranje bolezni, določanje ukrepov nujne pomoči in stalno spremljanje krvnega tlaka.

Naprave ne smemo uporabljati med prevozom bolnika ali med kirurškimi posegi. Uporabljamo jo lahko samo v domačem okolju ali v drugem stalnem mestu.

S pritiskom na gumb »VKLOP/IZKLOP« izključite napravo, če imate v roki nelagoden občutek, ali če se manšeta nenormalno in neprenehoma napihuje.



|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Otroci, mlajši od 12 let in osebe, ki ne morejo izraziti svoje volje, ne smejo uporabljati naprave. Osebe, stare od 12 do 18 let, morajo uporabljati napravo ob navzočnosti odraslih, ker lahko pride do poškodbe ali težave. |  |
| Napravo uporabljajte samo za merjenje krvnega tlaka, ker bi drugače lahko prišlo do nesreče ali težave.                                                                                                                       |                                                                                     |
| Prosim, da v bližini naprave ne uporabljate mobilnih telefonov. Prosim, da naprave ne uporabljate v bližini magnetnega polja.                                                                                                 |  |
| Glavne enote ali manšete merilnika krvnega tlaka ne razstavljajte, ne popravljajte ali ne spreminjajte. To bo povzročilo nepravilno delovanje naprave.                                                                        |                                                                                     |

## VARNOSTNI UKREPI PRED UPORABO


1. Če uživate zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom, da bo določil najprimernejši čas merjenja krvnega tlaka. NIKOLI ne zamenjajte predpisanega zdravila, če se niste prej posvetovali s svojim zdravnikom.
2. Pri ljudeh s težavami z nepravilno ali nestabilno periferno cirkulacijo zaradi sladkorne bolezni, bolezni jeter, otrdelosti krvnih žil itd. lahko pride do nihanja rezultatov merjenja krvnega tlaka na nadlakti v primerjavi z merjenjem na zapestju.
3. Merjenje je lahko ovirano, če napravo uporabljamo v bližini televizije, mikrovalovne pečice, rentgenskega aparata, mobilnega telefona ali druge opreme z močnim električnim poljem. Da bi to preprečili, uporabljajte merilnik dovolj daleč od takšnih naprav ali jih izključite.

4. Pred uporabo si umijte roke.
5. Merilnika ne uporabljajte na isti roki, na kateri hkrati uporabljate drugo medicinsko napravo, ker bi to lahko zmanjšalo njegovo delovanje.
6. Če so vrednosti meritve nepričakovane, se posvetujte s svojim zdravnikom in si tudi v tem priročniku oglejte razdelek »Odpravljanje težav«.
7. Vrednost doma opravljene meritve je zaradi umirjenega razpoloženja verjetno nekoliko nižja kot odčitek meritve v bolnišnici.
8. Pritisk manšete je od 0 do 299 mmHg.



## OPIS DELOV

LCD-prikazovalnik  
Datum in čas  
Sistolični krvni tlak  
Diastolični krvni tlak  
Srčni utrip/min.

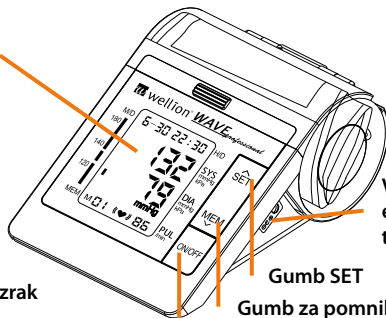


Vhodna moč  
enosmernega  
toka

Gumb SET

Gumb za pomnilnik

Gumb za VKLOP/IZKLOP


Priključek za zrak

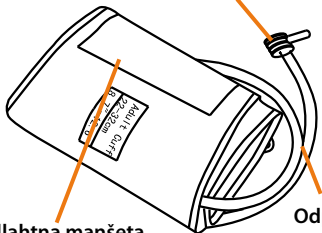


Nadlahtna manšeta

Odprtina za zrak


## Simboli na zaslonu

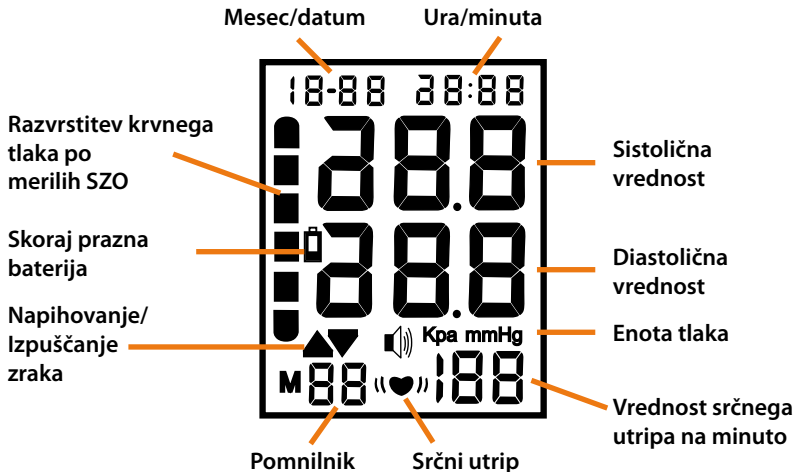

## Dodatna oprema

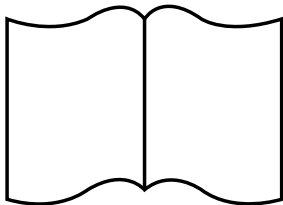

**Navodilo**

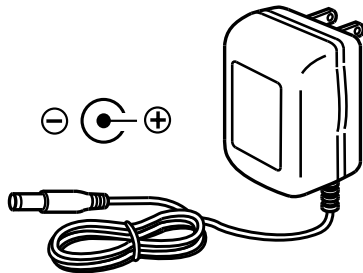


**Električni napajalnik  
(izbirno)**

Uporabljajte samo z merilnikom tlaka Wellion WAVE Professional, ki ga lahko kupite pri proizvajalcu merilnika krvnega tlaka.

## VSTAVLJANJE ALI MENJAVA BATERIJ

1. Odstranite pokrov prostora za baterijo.
2. V prostor za baterije vstavite novi bateriji tako, kot je prikazano in pazite, da se polarnosti (+) in (–) ujemajo.
3. Zaprite prostor za baterije. Uporabljajte samo baterije LR6 AA.

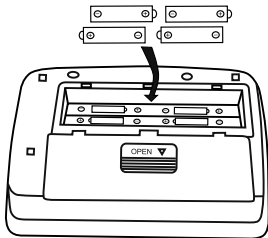



Iztrošene baterije odvrzite v primerni zabojnik v skladu z določili svoje države.




#### Opozorilo:

- Baterije vstavite v prostor za baterije tako, kot je prikazano. V nasprotnem primeru aparat ne bo deloval.
- Če na zaslonu utripa simbol za SKORAJ PRAZNO BATERIJO,  vse baterije zamenjajte z novimi. Ne mešajte starih in novih baterij. To lahko skrajša življenjsko dobo baterije ali povzroči slabo delovanje aparata.  
Simbol za SKORAJ PRAZNE BATERIJE  se ne pojavi, če se baterije iztrošijo.
- Pri zamenjavi baterij pazite, da se pozitivne in negativne polarnosti na bateriji in na aparatu ujemajo.
- V aparat ne vstavljajte baterij, ki imajo na površini tekočino ali so spremenjene.

- Med baterijami ne sme priti do kratkega stika.
- Življenjska doba baterije se spreminja glede na temperaturo prostora in je pri nizkih temperaturah lahko krajša.
- Baterije lahko puščajo in povzročijo slabo delovanje.
- Uporabljajte samo določene baterije. Baterije, ki so že v aparatu, so samo za preskušanje delovanja in imajo lahko krajše trajanje.
- Uporabljene baterije lahko puščajo in poškodujejo glavno enoto. Prosimo, upoštevajte spodnje točke.
  - Če aparata dlje časa ne boste uporabljali (približno tri mesece ali več), odstranite baterije.
  - Prazne baterije nadomestite tako, da bodo polarnosti pravilno usmerjene.

## NASTAVITEV ČASA


1. Stisnite in držite gumb »SET«, dokler na zaslonu ne začneta utripati zadnji dve številki leta, da vstopite v način nastavitve časa.
2. Stisnite gumb »MEM«, da pravilno nastavite leto, nato pa ponovno pritisnite gumb »SET«, da shranite nastavev in vstopite v način nastavitve meseca.
3. Stisnite gumb »MEM«, da pravilno nastavite mesec. Enake korake ponovite za nastavev datuma/ure/minut.

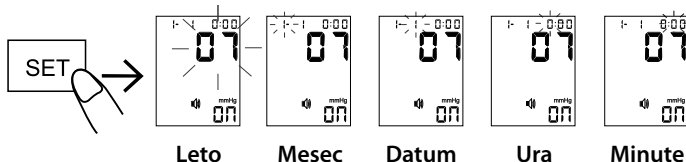

## NASTAVITEV ENOTE mmHg/kPa

Vrednosti so lahko prikazane v eni od dveh različnih enot: mmHg ali kPa.


V aparatu je prednastavljena enota mmHg. Če želite spremeniti merilno enoto, stisnite in pet sekund držite gumb »VKLOP/IZKLOP«. Upoštevajte, prosimo, da se bo merilna enota spremenila tudi pri vseh shranjenih vrednostih.

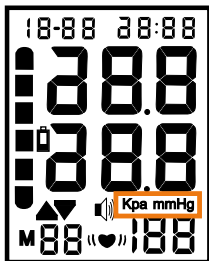




## PRIKAZ RAZVRSTITVE KRVNEGA TLAKA PO MERILIH SZO

Vir za diastolični krvni tlak:  
Journal of Hypertension  
1999. Vol. 17 No. 2

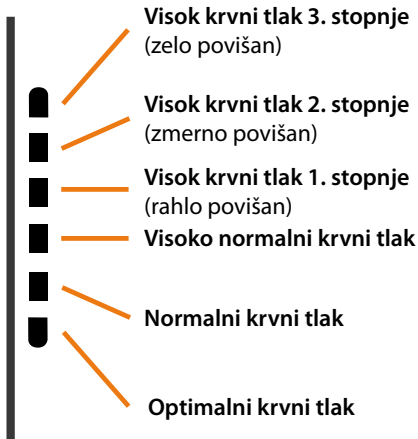

## NAMESTITEV MANŠETE

1. Manšeto ovijte okrog nadlakti približno 2 do 3 cm nad komolcem, kot je prikazano. Manšeto namestite neposredno na kožo, ker oblačila lahko oslabijo srčni utrip in posledica je napačna meritev.
2. Če zavihana oblačila stiskajo nadlaket, to lahko prepreči natančne odčitke.
3. Manšeto udobno namestite in jo zapnite z ježastim trakom tako, da ni pretesna. Roko položite na mizo (z dlanjo, obrnjeno navzgor) tako, da je nadlaket v višini srca. Prepričajte se, da cev ni prepognjena.

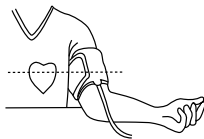


## Kako pravilno izvesti meritev krvnega tlaka

Za čim bolj natančno merjenje krvnega tlaka:


- Priporočeni bolnikov položaj: Udobno se usedite za mizo. Položite roko na mizo.
- 10 do 15 minut pred meritvijo počivajte.
- Med meritvijo mirujte in ne govorite.
- Ne merite krvnega tlaka takoj po telesni vadbi ali kopeli.
- Krvni tlak merite vsak dan ob približno enaki uri.

## KAKO MERITI KRVNI TLAK

1. Na nadlaket namestite manšeto tako, kot je opisano v razdelku »NAMESTITEV MANŠETE«.
2. Stisnite gumb »VKLOP/IZKLOP«. Na zaslonu se za dve sekundi samodejno prikažejo vsi simboli, nato pa se aparat preklopi na merjenje in na zaslonu se izpiše »00«.

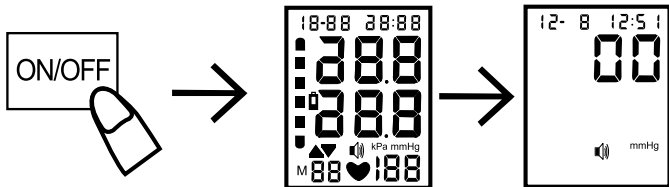

3. Ko se bo začelo merjenje, se bo manšeta samodejno napihnila. Na zaslonu bo utripal simbol za napihovanje manšete. Po končanem merjenju se bodo na zaslonu izpisali rezultati.

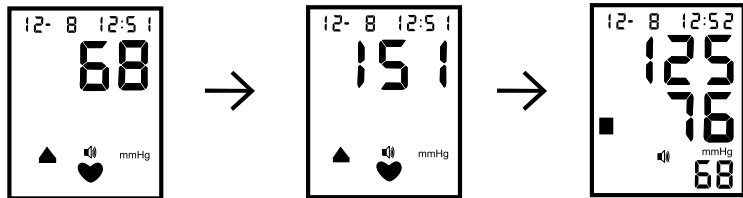


## Pregledovanje pomnilnika

Pritiskajte gumb »MEM«, da se med shranjenimi vrednostmi pomikate od zadnje meritve proti starejšim. Za pomik navzgor pritiskajte gumb »MEM«, za pomik navzdol pa gumb »SET«.

## Brisanje pomnilnika


Vstopite v način »READ MEMORY« (BRANJE POMNILNIKA), stisnite in 5 sekund držite gumb »MEM«, da se na zaslonu prikaže izpis »no«. To pomeni, da so bile vse shranjene vrednosti uspešno izbrisane.

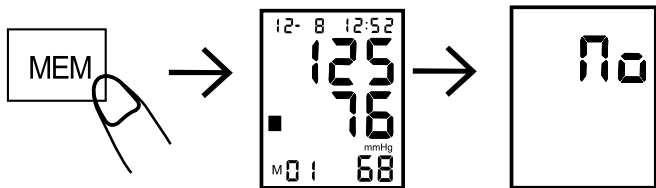

## NEGA IN VZDRŽEVANJE

Da se bo merilnik krvnega tlaka ohranil v dobrem stanju in da se ne bo poškodoval, upoštevajte spodnja navodila:

- Merilnik hranite v torbici za shranjevanje, kadar ga ne uporabljate.
- Manšete ne ovijajte pretesno.
- Merilnik in manšeto očistite z mehko in suho krpo.
- Ne uporabljajte grobih ali hlapljivih čistilnih sredstev.

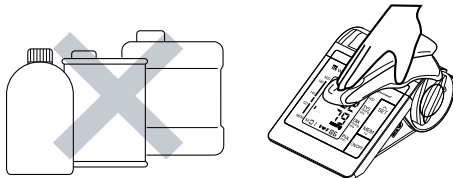



#### Opozorilo:

- Merilnika in njegovih sestavnih delov ne namakajte v vodi.
- Merilnika ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam, vlagi in neposredni sončni svetlobi.
- Merilnik in njegove sestavne dele hranite na čistem in varnem mestu.
- Merilnika ne izpostavljajte močnim udarcem, kot je na primer padec na tla.
- Odstranite baterije, če merilnika ne boste uporabljali tri mesece ali več.
- Vse iztrošene baterije vedno hkrati zamenjajte z novimi.



Informacija:

- Izdelek je namenjen za uporabo v daljšem časovnem razdobju, vendar na splošno priporočamo, da ga je treba pregledati in umeriti vsaki dve leti, da bi zagotovili pravilno in dobro delovanje.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če imate težave z uporabo aparata, najprej preverite spodnje točke.

| Prikaz napak                                                                                                                                                            | Možen vzrok                                   | Kako odpraviti napako                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Če pritisnete gumb za VKLOP ali utripa znak za baterijo,  zaslon ne prikazuje ničesar. | V aparatu ni baterij.                         | Vstavite baterije.                        |
|                                                                                                                                                                         | Baterije so izrabljene.                       | Stare baterije nadomestite z novimi.      |
|                                                                                                                                                                         | Baterije so vstavljene z napačno polarnostjo. | Baterije vstavite s pravilno polarnostjo. |
| E1: pritiska ni mogoče normalno povečati                                                                                                                                | Preverite, ali manšeta pušča zrak.            | Staro manšeto nadomestite z novo.         |

|                                                                                                             |                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| E3: previsok pritisk<br>vpihanega zraka                                                                     |                                           | Ponovite meritev ali ponovno umerite aparat. |
| E2E4: premikanje med merjenjem                                                                              | Premikanje roke ali telesa med merjenjem. | Ponovite merjenje in bodite pri miru.        |
| Battery icon <br>displayed | Baterije so skoraj prazne.                | Zamenjajte baterije in ponovite merjenje.    |

|                                                                 |                                                |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Previsoka vrednost sistoličnega ali diastoličnega tlaka         | Manšeta je bila nižje od srca.                 | Namestite se v pravilni položaj in se med ponovnim merjenjem ne premikajte. |
|                                                                 | Manšeta ni bila pravilno nameščena.            |                                                                             |
|                                                                 | Med merjenjem ste premikali telo ali govorili. |                                                                             |
| Prenizka vrednost sistoličnega ali diastoličnega krvnega tlaka. | Manšeta je bila višje od srca.                 |                                                                             |
|                                                                 | Med merjenjem ste premikali telo ali govorili. |                                                                             |

## SPECIFIKACIJA IZDELKA:

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merilna metoda:</b>   | Oscilometrično merjenje                                                                                                                                                    |
| <b>Zaslon:</b>           | Digitalni LCD-prikazovalnik                                                                                                                                                |
| <b>Razpon merjenja:</b>  | Tlak: 30 - 280mmHg; Srčni utrip: 40 - 199 udarcev/min                                                                                                                      |
| <b>Natančnost:</b>       | Statični tlak: $\pm 3$ mmHg; Srčni utrip: $\pm 5\%$                                                                                                                        |
| <b>Pomnilnik:</b>        | 90 shranjenih vrednosti                                                                                                                                                    |
| <b>Napajanje:</b>        | 4x 1,5V baterije LR6 oder AA                                                                                                                                               |
| <b>Pogoji delovanja:</b> | + 5°C - + 40°C; 15% RH - 93% RH<br>Zračni tlak: 70kPa - 106kPa                                                                                                             |
| <b>Pogoji hranjenja:</b> | - 20°C - + 55°C; 0% RH - 93% RH<br>Zračni tlak: 50kPa - 106kPa                                                                                                             |
| <b>Velikost:</b>         | Pribl.: 165 (D) X 235 (V) X 100 (Š) mm                                                                                                                                     |
| <b>Teža:</b>             | Pribl.: 750 g brez baterij                                                                                                                                                 |
| <b>Razvrstitev:</b>      | Tip BF                                                                                                                                                                     |
| <b>Obseg nadlakti:</b>   | 22 - 32 cm                                                                                                                                                                 |
| <b>AC napajalnik:</b>    | VHOD: 100 – 240V 50/60Hz, 0,3A<br>IZHOD: 6V, 500 mA<br>Uporabljajte izključno varnostno preverjen napajalnik, ki ga lahko kupite pri proizvajalcu merilnika krvnega tlaka. |

1. Vrsta zaščite pred električnim udarom:  
OPREMA Z LASTNIM NAPAJANJEM
2. Stopnja zaščite pred električnim udarom: OPREMA TIPA BF.
3. Način delovanja: NEPREKINJENO DELOVANJE
4. Naprava ni primerna za razvrstitev v kategorijo opreme AP in APG.

## IZJAVA

Sistem morda ne bo deloval v skladu z navedeno zmogljivostjo, če se ne bo hranil ali uporabljal pri spodaj navedeni temperaturi in vlažnosti:

- Pogoji delovanja: +5°C~+40°C  
15%RH~93%RH; 70kPa~106kPa
- Pogoji hranjenja: -20°C ~+55°C  
0%RH~93%RH

## LASTNOSTI IZDELKA

1. Pomnilnik lahko shrani 90 meritev.
2. Velik in razločen LCD-zaslon.
3. Prikaz razvrstitve krvnega tlaka po merilih SZO.
4. Preprosta uporaba, samodejno merjenje s pritiskom na gumb, beleženje merilnih vrednosti in čas merjenja.
5. Samodejni izklop (po 1 minuti) zaradi varčevanja z energijo.

## PROIZVAJALČEVE ZAHTEVE

- Da preprečite poškodbo bolnika, se pred začetkom merjenja prepričajte, da priključna cev ni prepognjena.
- Pri nobenem bolniku ne merite krvnega tlaka več kot 3–krat zapored. Med vsakim merjenjem mora biti vsaj 5 minutni počitek, ker v nasprotnem primeru lahko pride do pomanjkanja krvi v krvni žili.
- Krvnega tlaka ne merite več kot 6–krat dnevno.
- Ne nameščajte manšete čez rano, ker to lahko povzroči še hujšo poškodbo.
- Opazujte vrednosti zračnega tlaka na LCD-zaslonu.



- Med merjenjem tlak ne sme prekoračiti 299 mmHg. Če se to zgodi, s pritiskom na gumb »VKLOP/IZKLOP« izključite aparat.
- Manšete ali cevke za zrak ne upogibajte s silo.
- Glavne enote ne udarjajte in pazite, da vam ne pade na tla.
- Vedno uporabljajte dodatke, navedene v navodilih za uporabo; uporaba drugih delov, ki jih ne potrdi proizvajalec, lahko privede do napačnih rezultatov meritev ali poškodb.
- Za informacijo o servisnih storitvah, naročanju rezervnih delov itd. se, prosimo, obrnite na prodajalca.

## IZJAVA O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI

1. Izjava, da se mora ta oprema namestiti in dati v uporabo v skladu z informacijo, navedeno v SPREMNIH DOKUMENTIH in
2. izjava, da lahko brezžična komunikacijska oprema, kot so brezžične domače brezžične naprave, mobilni telefoni, brezžični telefoni in njihove osnovne postaje ter prenosni radijski oddajniki in sprejemniki, vpliva na ta aparat in se je ne sme hraniti v bližini aparata. PROIZVAJALEC je to oddaljenost izračunal glede na stolpec 800 MHz do 2,5 GHz tabele 5 ali tabele 6 IEC 60601-1-2:2007, kot je primerno.

## GARANCIJA PROIZVAJALCA

Proizvajalec jamči za neoporečnost materialov in izdelave merilnika krvnega tlaka Wellion WAVE professional za obdobje dveh (2) let od dneva nakupa. Garancija je neveljavna, če se naprava nepravilno uporablja, slabo vzdržuje ali se vanjo posega.

Odgovornost na podlagi te garancije je omejena na popravilo okvarjenih delov ali – po presoji proizvajalca – zamenjavo aparata. Pravica do preklica kupoprodajne pogodbe se lahko uveljavlja le v primeru, da je okvarjena tudi zamenjana naprava. Obravnavani ne bodo nobeni drugi odškodninski zahtevki.

Garancija je neveljavna, če je poškodba nastala zaradi nepravilne uporabe, slabega ravnanja, poseganja v aparat, človeške napake ali uporabe v izrednih pogojih.

Garancija je veljavna le v primeru, da so na garancijskem listu zabeleženi datum nakupa, žig in podpis prodajalca.

Garancijska doba se ne podaljša zaradi kakršnegakoli odškodninskega zahtevka na podlagi te garancije.

# wellion®

## WAVE

*professional*



MED TRUST Handelsges.m.b.H.  
Gewerbepark 10  
7221 Marz  
AUSTRIA  
[www.medtrust.at](http://www.medtrust.at)

CE 0197

© MED TRUST, Wellion and WAVE are registered trademarks.



WWWAVE032PSJ RevA 03/2016