



Tekočina za odstranjevanje bradavic

A. Za kaj in kdo lahko uporablja Wortie® Liquid?

Wortie® Liquid, pripomoček za odstranjevanje bradavic na rokah ali nogah, je na voljo brez recepta. Wortie® Liquid je primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

B. Ozadje nastanka bradavic

Navadne bradavice so majhni izrastki, ki jih povzroča humani papiloma virus (HPV), ki je zelo nalezljiv, in se lahko prenaša z ene osebe na drugo ali z enega mesta na telesu na drugo, z neposrednim stikom z okuženim področjem. Bradavice se pogosto razvijejo na prstih ali na hrbtini strani dlani, kolenih in komolcih. Prepoznate jih po grobem, 'cvetastem' izgledu na površini.

Bradavice na stopalih se pojavljajo le na podplatih ali pod prsti nog. Običajno so boleče in so videti kot majhen bel obroč na koži, s črnimi pikami v sredini. Te bradavice so prav tako nalezljive in se lahko prenašajo na drugo osebo s stikom z mokro površino, npr. tlemi.

Navadne bradavice in bradavice na stopalih se tradicionalno odstranjujejo na dva načina. Prvi način je s kislimi tekočinami kot je Wortie® Liquid, ki delujejo tako, da bradavico razgradijo. Drugi način vključuje fizično odstranitev bradavice z laserjem ali zamrzovanjem.

C. Zakaj je Wortie® Liquid drugačen?

Wortie® Liquid je zasnovan na podlagi znanstvenih dognanj in ima edinstveno kombinacijo sestavin, ki omogočajo, da je formulacija pripomočka manj agresivna za učinkovito odstranitev bradavic. Ta formulacija se na koži hitro posuši in tako ne pušča madežev, zelo natančen aplikator pa preprečuje poškodbo zdrave okolne kože. Prozoren obliž po nanosu tekočine prekrije bradavico in zagotovi, da bo tekočina ostala na mestu in istočasno zaščiti bradavico.

D. Kako Wortie® Liquid deluje?

GTA tehnologija (tehnologija glikolne kisline + trikloroocetne kisline + alkohola):

Ta tehnologija je za Wortie® Liquid edinstvena in je zasnovana na najnovejših znanstvenih dognanjih o bradavicah. Je inovacija, ki jo je razvila skupina zdravstvenih strokovnjakov, in omogoča zelo hitro uporabo.

• **Učinkovita in bolj varna mešanica sestavin**
Wortie® Liquid formulacija je zasnovana na mešanici dobro poznanih kislin, ki se uporabljajo za odstranjevanje bradavic. Kombinacija teh sestavin omogoča, da je formulacija pripomočka za učinkovito odstranitev bradavic manj agresivna.

Wortie® Liquid formulacija ima dvojno delovanje:
• Lušči vrhnje plasti, ki tvorijo zadebeljen del bradavice. To zmehča zatrdelo kožo in tako omogoči

odstranitev bradavice (aktivna sestavina: glikolna kislina)

- Globoko luščenje tkiva, ki tvori bradavico (aktivna sestavina: trikloroocetna kislina).

E. Hiter in natančen


Wortie® Liquid se posuši v približno 30 sekundah in s tem pomaga preprečiti madeže in draženje. Natančen aplikator preprečuje poškodbo zdrave okolne kože.

• Prozorni obliž za zaščito

Wortie® Liquid ima dodane obliže za zaščito področja po nanosu pripomočka. Obliži omogočajo daljšo izpostavljenost aktivnim sestavinam. Poleg tega delujejo kot zaščitna plast, ki ohranja področje čisto, ščiti pred dotikanjem, skriva bradavico, da se izognete zadregi, in zmanjša možnost prenosa virusa bradavice na druge.

F. Kako uporabite Wortie® Liquid?

Prizadeto področje umijte s toplo vodo in milom. Pred nanosom izdelka se prepričajte, da je koža suha.

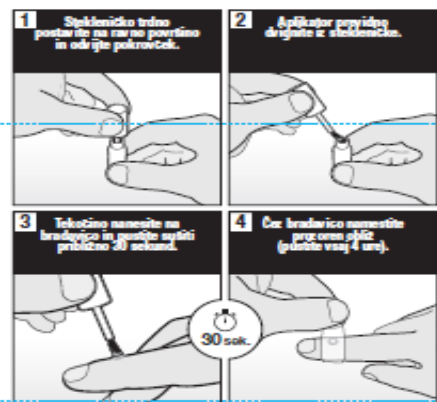

Wortie® Liquid stekleničko postavite na ravno površino (npr. umivalnik), da se izognete politju.

- S pomočjo Wortie® Liquid aplikatorja natančno nanesite tanko plast tekočine na bradavico. Pazite, da tekočine ne nanesete na zdravo okolno kožo. Če se to kljub temu zgodi, obrišite odvečno tekočino z robčkom, oziroma če je potrebno, umijte področje z vodo in milom. Nato pripomoček previdno ponovno nanesite.
- Počakajte, da se tekočina posuši (približno 30 sekund).
- Ko je področje nanosa povsem suho, namestite na bradavico obliž.
- Obliž pustite na mestu vsaj 4 ure ali dokler ne odpade. Če je obliž po 24 urah še vedno na bradavici, ga previdno odstranite in umijte področje s toplo vodo in milom.
- Pripomoček nanašajte 2-krat na teden kot je opisano zgoraj dokler bradavica ne izgine.

Cas, da bradavica izgine je v veliki meri odvisen od velikosti bradavice. Nekateri bradavice izginejo po enem tednu uporabe pripomočka, medtem ko je za večje bradavice potrebno več časa, do 8 tednov.

Pomembno je, da se natančno držite navodil za uporabo pripomočka. Nepravilna uporaba lahko povzroči pekoč občutek ali draženje zdrave kože in povzroči trajno poškodbo zgornje plasti kože.

G. Opozorila

- Uporabite samo skladno z navodili za uporabo.
- Tekočino nanesite samo na bradavico.
- Bodite posebno pozorni, da pripomočka ne nanašate na zdravo okolno kožo.
- Ne nanašajte na področja s tanko ali občutljivo kožo, kot so obraz, pazduhe, prsi, zadnjica ali genitalno področje. Uporaba na teh področjih lahko povzroči draženje in/ali brazgotinjenje.
- Ne uporabljajte pripomočka, če bradavice ne vidite jasno ali naj vam nekdo pomaga z nanosom.
- Ne uporabljajte pripomočka, če ste preobčutljivi na katerikoli izmed sestavin.
- Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 4 let.
- Ne uporabljajte na razdraženi koži ali na kateremkoli področju, ki je okuženo, pordelo ali kaže znake vnetja kot sta srbenje ali otekanje. Nanos pripomočka na ta področja lahko povzroči poslabšanje stanja, ki morda ni bradavica in ga mora pregledati zdravnik.
- Če s pripomočkom oskrbujete kožno spremembo, ki ni bradavica, se lahko čas zdravljenja podaljša. Stanje vaše kože se lahko resno poslabša ali vodi do bolezni.
- Ne uporabljajte na pecljatih kožnih izrastkih, pegah, materinih znamenjih, bradavicah, iz katerih rastejo dlake, genitalnih bradavicah (na penisu ali vaginalnem področju) ali na bradavicah na obrazu ali sluznici (npr. v ustih, nosu, anusu, genitalijah, ustnicah, ušesih ali v bližini oči). Uporaba na teh področjih lahko povzroči opekline ali trajno brazgotinjenje kože ali vodi do slepote, če pride v oči.
- Obližev ne uporabite ponovno.
- Pripomočka ne uporabite, če informacij na steklenički in navodilu za uporabo ne vidite jasno.
- Ne nanašajte pripomočka skupaj z drugimi metodami odstranjevanja bradavic, ker ni jasno, kako bo kombinacija vplivala na vašo kožo.
- Pripomočka ne uporabite, če ste noseči, dojite, imate sladkorno bolezen ali slabo prekrvavitev.
- Izogibajte se stiku z očmi. Če ste pripomoček nanesli na roke, z njimi ne drgnite ali se dotikajte oči. Pri stiku z očmi izpirajte z vodo 15 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Pripomočka ne zaužijte. Vsečina je strupena in lahko povzroči resno notranjo poškodbo. V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite Center za zastrupitve.
- Samo za zunanjo uporabo. Če pripomočka ne uporabljate skladno z navodili ali ga pomotoma nanesete neposredno na kožo ali stanje, ki ni bradavica, lahko povzroči draženje in brazgotinjenje kože.
- Shranjujte nedosegljivo otrokom. Otroci ne razumejo navodil, kako pravilno uporabljati ta izdelek. Vsečina je ob zaužitju ali uporabi na drugih delih telesa kot bradavice, nevarna. Nevarnost zadušitve – vsebuje majhne delce.
- Vnetljivo. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi, ločeno od virov toplote.

H. Previdnostni ukrepi

- Glikolna kislina in trikloroocetna kislina sta jedki kislini. Pripomoček nanašajte samo na bradavico, izogibajte se zdravi okolni koži.
- Po nanosu se izogibajte izpostavljanju oskrbovanega področja UV svetlobi ali neposredni sončni svetlobi, da se izognete draženju ali hiperpigmentaciji. Uporaba obliža vam pomaga pri zaščiti pred neposredno sončno svetlobo.

- Wortie® Liquid lahko poškoduje vaše imetje, če pride v stik z oblačili, nakitom, pohištvom ali tlemi.
- V primeru vnetja ali močnejše bolečine in rdečine po nanosu, prekinite z uporabo izdelka, previdno umijte področje z vodo in milom, da odstranite izdelek s kože ter se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če opazite, da rdečina ali draženje vztrajata po enem ali več nanosov, prenehajte z uporabo pripomočka in se posvetujte z zdravnikom.
- Če nanesete preveč tekočine, lahko povzroči draženje.
- Posebno previdni bodite, če pripomoček nanašate na suho kožo.
- Wortie® Liquid mora otroku (4+) nanesti odrasla oseba.
- Posvetujte se z zdravnikom, če po 3 mesecih redne uporabe ne opazite izboljšanja.
- Izdelek naj uporablja le ena oseba, s tem se vzdržuje optimalna osebna higiena.

I. Možni neželeni učinki

Kot vsi drugi odstranjevalci bradavic, ima tudi Wortie® liquid lahko neželene učinke, čeprav se ne pojavijo pri vseh uporabnikih:

- Med delovanjem raztopine boste lahko občutili rahlo žbadijajoč ali pekoč občutek in/ali blago občutljivost oskrbovanega področja. To je običajno prehodno; v redkih primerih se lahko na koži pojavijo madeži (temna ali rdeča koža).
- Prenehajte z uporabo izdelka in takoj obvestite vašega zdravnika ali farmacevta, če se ti učinki poslabšajo ali se izrazi nepričakovano nelagodje.
- Zaščitite oskrbovano področje pred neposredno UV svetlobo in soncem, da se izognete draženju ali hiperpigmentaciji. Uporaba obliža vam pomaga pri zaščiti pred neposredno sončno svetlobo.

J. Nadaljevanje zdravljenja

- Oskrbovano področje ohranjajte čisto.
- Med uporabo pripomočka lahko plavate ali se prhate.
- Oskrbovanega področja ne praskajte, ker lahko pride do okužbe.
- Izogibajte se soncu.

Vsebina pakiranja Wortie® Liquid

- Steklenička, napolnjena s 5 ml tekočine. Količina tekočine je zadostna za 18 nanosov, kar pokrije celoten čas oskrbe.
- 18 brezbarvnih obližev za enkratno uporabo za prekritje in zaščito bradavice po nanosu tekočine.

To navodilo za uporabo vsebuje informacije o delovanju pripomočka kot tudi opozorila in omejitve pri uporabi.

Sestavine: denaturiran alkohol, glikolna kislina, trikloroocetna kislina

CE 0481

Datum revizije navodila: oktober 2016

Izdelek lahko uporabljate do konca roka uporabe, označenega na škatli.

Izdelovalec:
YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Nizozemska

Distributer:
Medis, d.o.o.
Brničeva 1,
Ljubljana